



Aawyx®-2271 DSAA

Détergent - Désinfectant

Sans Aldéhyde

Sans ammonium quaternaire

Aawyx-2271® DSAA concentré parfumé est destiné au nettoyage et à la désinfection des surfaces de dispositifs médicaux, matériels, sols en milieu médical, dentaire, scientifique et industriel.

Aawyx-2271® DSAA concentré parfumé ne contient **ni Aldéhyde, ni ammonium quaternaire.**

Utilisable en nettoyage et désinfection par balayage et/ou essuyage humide. Ne nécessite pas de rinçage.

Aawyx-2271® DSAA concentré parfumé est agréablement parfumé à l'eucalyptus.

Sécurité optimale : sans aldéhyde et sans ammonium quaternaire
Compatible avec tous types de surfaces.

Recommandé avec l'utilisation en alternance des détergents de la gamme **Aawyx®**
Ne colle pas, ne laisse pas de trace.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

ESSAI MICRO-ORGANISMES CIBLES

ACTIVITE BACTERICIDE

EN 1040 *Pseudomonas aeruginosa*

Staphylococcus aureus

EN 1276 Conditions de saleté

Pseudomonas aeruginosa

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Enterococcus hirae

CONCENTRATION

Norme qualitative

0,5 %

TEMPS DE CONTACT

15 minutes

15 minutes

ACTIVITE LEVURICIDE

EN 1275 *Candida albicans*

EN 1650 Conditions de saleté *Candida albicans*

Norme qualitative

0,5 %

15 minutes

15 minutes



Aawyx®-2271 DSAA

Détergent - Désinfectant

Sans Aldéhyde

Sans ammonium quaternaire

PROTOCOLE D'UTILISATION

Préparation de la solution à 0.5%

1. Porter des gants.
2. Diluer 20 ml pour 4L d'eau du réseau.
3. Utiliser immédiatement la solution prête à l'emploi.

Utilisation

Procéder par balayage ou essuyage humide sur les surfaces à traiter.
Eliminer la solution souillée après utilisation.

Caractéristiques physico-chimiques

pH 0.5% : 9.60 - Etat physique : liquide fluide - Parfum : eucalyptus - Couleur : incolore

Composition :

Tensio-actifs anionique et non ionique, Alkylamine, Séquestrants, parfum eucalyptus.

TP 2 : Produits pour désinfecter l'air, les surfaces, les matériaux, les équipements et le mobilier non en contact avec des denrées alimentaires.

Utilisez les produits biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Conditionnement :

Réf : AA-2271 carton de 6 flacons de 1L à chambre doseuse

Réf : AA-2272 carton de 4 bidons de 5L

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Voir Fiche technique et fiche de sécurité

FT n°1166.... / 20.08.2010